

HEAZE AcuPharma

-HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ-

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az AcuPharma akupunktúrási eszközt választotta! Ez az eszköz lehetővé teszi az otthoni fülakupresszúra kezelés egyszerű és hatékony alkalmazását. A kezelés célja a test különböző pontjainak stimulálása a fülön keresztül, mely segíthet enyhíteni a panaszokat és támogatni a szervezet természetes egyensúlyát.

Az eszköz két részből áll: egy tapadófelületből és egy kemény nyomópontból (golyóból), amely a kiválasztott akupunktúrási pontot stimulálja.

Használati javaslat:


- ① Azonosítsa a kezelendő pontot a fültérkép alapján. A térkép segít eligazodni, hogy mely pont melyik testrészhez vagy szervhez kapcsolódik (pl. emésztés, fájdalomcsillapítás, stresszoldás).
- ② Tisztítsa meg a fül bőrét enyhén alkoholos vattával vagy fültisztítóval a kiválasztott pont környékén.
- ③ Helyezze fel az AcuPharma tapaszt úgy, hogy a golyó pontosan a kívánt akupresszúra pontra kerüljön.
- ④ A tapaszt 1–3 napig a fülön maradhat, ezután cserélje újra.

Fontos tudnivalók:


- Ne használja nyílt seb, bőrirritáció vagy gyulladás esetén.
- Ha kellemetlen érzést vagy allergiás reakciót tapasztal, távolítsa el a tapaszt.
- Gyermkektől elzárva tartandó.
- Az akupresszúra kezelés nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést.

Akupunktúrás pontok a fülön

előlről nézve

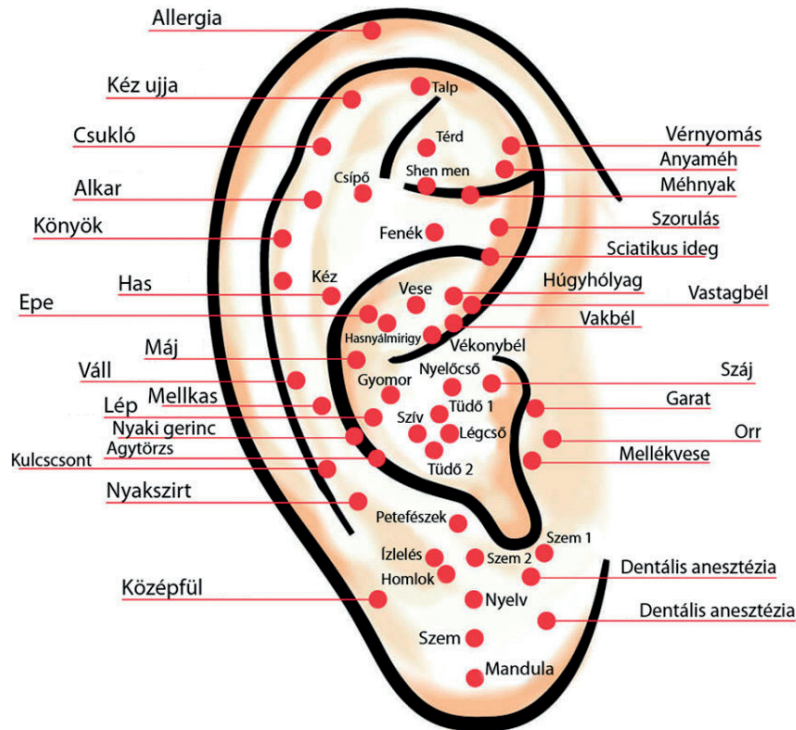

hátról nézve

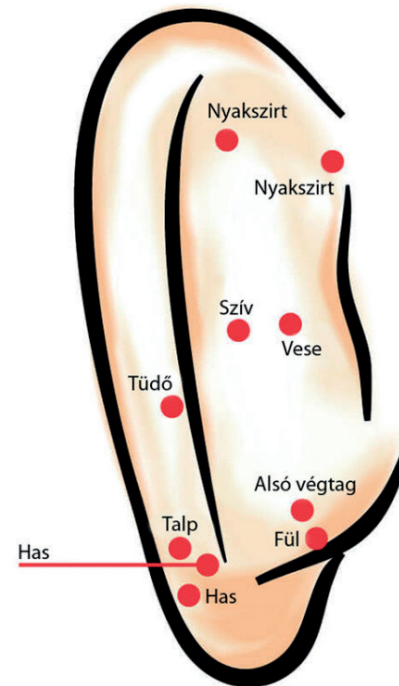

További információ: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 5. www.heaze.hu | info@heaze.hu | 06 70 672- 6515